

DE

Anwendungshinweise für Edelstahl Draht

- bei der mechanischen oder thermischen Bearbeitung (z.B. Schweißen, Trennen, Schleifen) können Stäube und Rauche auftreten. – Absaugmaßnahmen an der Maschine/ am Arbeitsplatz vornehmen.
- nicht zu hohen Frequenzen (Schwingungen) aussetzen, um eine Erhärtung des Drahtes zu vermeiden .
- abhängig von der jeweiligen Be- und Verarbeitung, evtl. Handschutz und/oder Schutzbrille tragen.
- Die Haltbarkeit des Edelstahldrahtes ist unbegrenzt.

Reinigung und Desinfektion:

Die Produkte werden weder steril geliefert noch vom Anwender sterilisiert.

Aufbereitungsempfehlungen nach DIN EN ISO 17664

n.z.

Lagerungs- und Aufbewahrungshinweise:

trocken und sauber lagern. Grundsätzlich sind die Produkte vor Chemikalien und Säuren zu schützen. Keinen hohen Schwingungen aussetzen.

Bitte beachten Sie die Symbole auf der Verpackung:



Einmalgebrauch

Lot—Nummer – ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der entsprechenden Produktionscharge

Bestell-Nummer

Gebrauchsanweisung beachten